

# 护牙素

## GC Tooth Mousse

局部使用的乳剂含有人体可吸收的钙和磷。

日本GC护牙素是一种供局部使用的乳剂，含有人体可吸收的钙和磷。产品以水为基质，含10%CPP-ACP(酪蛋白磷酸多肽-不定形磷酸钙)。CPP-ACP在口腔内会粘附在生物薄膜，牙菌斑，细菌，羟基磷灰石及软组织上，供给机体可吸收的钙和磷。唾液会增加CPP-ACP的作用，而护牙素的味道会刺激唾液的产生，护牙素和唾液停留在口腔的时间越长，效果就越好。

### 护牙素含有人体可吸收的钙和磷

1. 给牙齿提供额外的保护；
2. 有助于中和和牙菌斑中由产酸菌产生的酸；
3. 有助于中和其他内部和外部来源的酸。

#### 【禁忌症】

由于CPP-ACP是由牛奶的酪蛋白抽提出来的，对牛奶过敏或怀疑对牛奶过敏的人以及对安息(香)酸盐防腐剂过敏的人忌用。

#### 【型号、规格】

GC Tooth Mousse

#### 【气味】

薄荷(I)，草莓(S)，蜜瓜(M)，香草(V)，什果(T)，巧克力(C)。

注：括号内的I，S，M，V，T，是每种味道的缩写，印在批号的后面，标识该护牙素的气味。

#### 【主要结构组成或者成分】

该产品由CPP-ACP酪蛋白磷酸多肽-不定形磷酸钙和磷酸盐组成。

#### 【适用范围】

- a. 牙齿漂白之后；
- b. 超声波洁牙，手动洁牙和牙根刮治后；
- c. 专业性的牙齿清洁(PTC)后；
- d. 过敏症的预防和控制；
- e. 在正畸治疗过程中；
- f. 龋齿高危人群；
- g. 牙齿酸侵蚀，口腔干燥症和sjögrens综合症。

#### 【使用方法】

在牙科诊所的使用方法

##### I. 使用塑料托盘：

1. 使用前，用流水彻底冲洗塑料托盘。
2. 挤出足量的护牙素在托盘上，然后将托盘压在上颌或下颌的牙齿上，维持3分钟。
3. 除去托盘。
4. 指导使用者用舌头把剩余的护牙素涂匀整个口腔，使护牙素在口内停留尽可能长的时间(至少1-2分钟)，不要吐出或吞下。告知使用者护牙素和唾液在口内停留时间越长，效果就会越好。
5. 嘱咐患者吐出口内护牙素，如有可能尽量不要漱口，剩余在牙面的护牙素会慢慢融化。使用者在涂后30分钟内不要进食或饮水。
6. 托盘使用完后，立即用刷子除去残留的护牙素，再用流水冲洗。

##### II. 不用托盘使用护牙素：

1. 如有需要，可用棉球吸去牙面上的唾液，但不需要用气枪吹干牙面。
2. 挤出足够的护牙素，用棉签或戴指套的手指把护牙素涂在牙面上，在难以涂抹到的牙缝间可用牙间隙刷涂上。
3. 维持3分钟。
4. 指导使用者用舌头把剩余的护牙素涂匀整个口腔，使护牙素在口内停留尽可能长的时间(至少1-2分钟)，不要吐出或吞下。告知使用者，护牙素和唾液在口内停留的时间越长，效果就会越好。
5. 嘱咐患者吐出口内护牙素，如有可能尽量不要漱口，剩余在牙面的护牙素会慢慢融化。使用者在涂后30分钟内不要进食或饮水。

在家的使用方法

##### III. 牙科专业推荐，在白天刷牙后使用

1. 取足够量的GC护牙素涂在上颌和下颌的牙面上，每个幅面至少要有豌豆大小的量，用一只干净的手指或用一支清洁的棉签把护牙素涂在牙面上，难涂抹的位置(如两牙之间)，把护牙素涂在间隙刷或牙线上再涂在牙缝上。
2. 让护牙素在牙面上静置至少3分钟。
3. 用舌头把GC护牙素涂抹整个口腔，并尽可能使其在口腔内停留较长的时间(1-2分钟以上)，避免吐出或吞下，GC护牙素与唾液在口腔作用的时间越长，效果就越好。
4. 把口腔内的护牙素全部吐出，如有可能尽量不要漱口，剩余在牙面上的护牙素会慢慢融化。在随后的30分钟内不要进食或饮水。

##### IV. 牙科专业推荐，在晚上刷牙后使用

1. 取足够量的GC护牙素涂在上颌和下颌的牙面上，每个幅面至少要有豌豆大小的量，用一只干净的手指或用一支清洁的棉签把护牙素涂在牙面上，难涂抹的位置(如两牙之间)，把护牙素涂在牙间隙刷或牙线上再涂在牙缝上。
2. 让护牙素在牙面上静置至少3分钟。
3. 用舌头把GC护牙素涂抹整个口腔，并尽可能使其在口腔内停留较长的时间(1-2分钟以上)，避免吐出或吞下，GC护牙素与唾液在口腔作用的时间越长，效果就越好。
4. 把口腔内的护牙素全部吐出，如有可能尽量不要漱口，剩余在牙面上的护牙素会慢慢融化。在随后的30分钟内不要进食或饮水。

#### 【使用中的注意事项】

1. 使用后请把盖子重新盖好并除去残留在管口边缘的护牙素。
2. 如不小心接触到眼睛，请马上用清水冲洗并咨询专业医护人员。
3. 如有护牙素粘在衣服上，请用清水清洗。
4. 使用后如出现有血管浮肿的症状，表明使用者对安息(香)酸盐防腐剂或对产品的其它成分敏感或过敏，如一种香精。如有这种情况发生，应停止继续使用本品或请参照医嘱。

#### 【贮藏·保管方法及使用期限等】

存放在摄氏25度以下8度以上的阴凉干燥处，避免阳光直射，无需冷藏。

有效期：生产日期起2.5年。

生产日期：见外包装

**【包装】**

每支重量40克(35毫升)

1. 套装

10支x 40克(草莓，蜜瓜，香草，薄荷，什果各2支)

10支x 40克(巧克力)

2. 补充装

1支x 40克

备注：

GC护牙素含有酪蛋白磷酸多肽-无定形磷酸钙基团的配方是澳大利亚墨尔本大学牙科学院发明。RECALDENT为授权使用的注册商标，酪蛋白磷酸多肽-无定形磷酸钙的技术专利已在澳大利亚，新西兰，欧洲，加拿大和美国注册或备案。

**【注册人及代理人的住所及联络方式等】**

注册人名称：而至株式会社

注册人住所：东京都文京区本乡三丁目2番14号

生产地址：静冈县骏东郡小山町中日向 584 番 1 号

联系方法：电话：81-3-3558-5182

传真：81-3-3965-1567

代理人/售后服务单位名称：而至齿科（苏州）有限公司  
代理人/售后服务单位住所：苏州市工业园区青丘街 127 号

电话：0512-62833083 传真：0512-62833089

医疗器械注册证编号：国械注进 20163172864

产品技术要求编号：国械注进 20163172864

说明书修订日期：2022年08月 版本号：07