

GC 干口胶

为口腔干燥症状提供舒适的解决方案

在使用之前，请仔细阅读使用说明。

GC 干口胶为缓解口腔干燥症而开发，推荐因口干症状而影响生活质量的人使用。GC 干口胶不含糖成分。

适用范围

- 1.缓解和减轻口腔干燥的症状。
- 2.为牙齿和口腔粘膜提供保护。
- 3.帮助降低口腔异味。

禁忌症

- 1.GC 干口胶含有苯甲酸酯类保鲜剂，对此类保鲜剂有过敏症的患者请不要使用。
- 2.在少数情况下，产品可能引起一些人的敏感。如果发生类似情况，请立刻停止使用该产品，并咨询医生。

使用方法

- 1.当口腔感觉干燥的时候，使用 GC 干口胶。它能在白天或晚上随时使用。
- 2.在手指上或棉棒上挤来自管内的适量的 GC 干口胶，涂抹于舌部、口腔黏膜或牙齿上。

口味

水果沙拉 (F)，覆盆子 (R)，桔子 (O)，柠檬 (L)，薄荷 (M)

F, R, O, L 和 M 是每种口味的缩写。

这些缩写在产品批号后作标记表示产品的口味。

如 060815F 水果沙拉味

存储

建议存储于凉爽环境，避免光照 (8-25°C) (46.4-77.0°F) (有效期为生产日期起 3 年)

包装

每支含 40 克 (35 毫升)

1. 10 支综合口味大包装 (5 种口味每种 2 支)；
2. 5 支综合口味大包装 (5 种口味每种 1 支)；
3. 10 支单一口味大包装；
4. 5 支单一口味大包装。

注意事项

- 1.避免与眼睛的接触。一旦接触，立刻以大量的水冲洗，并寻求医生的帮助。
- 2.使用后立即除去多余材料，并拧紧盖子。
- 3.如果污染衣物，可以用水清洗。
- 4.正在接受处方药物治疗的患者在使用该产品前应先咨询医生。
- 5.GC 干口胶可以配合 GC 护牙素或 GC 护牙素加强型组合使用。



制造商

而至株式会社 (GC CORPORATION)

日本东京都板桥区莲沼町 76-1

中国大陆售后服务单位

而至齿科 (苏州) 有限公司

江苏省苏州工业园区青丘街 127 号

电话: 0512-62833083 传真: 0512-62833089 邮编: 215126