

粘接用聚羧酸盐水门汀

【型号、规格】

色调：浅黄色。

包装规格：粉剂 50 g/瓶，液剂 30 g(25.4 mL)/瓶。

【主要结构组成或者成分】

- 粉剂：氧化锌、氧化镁、氟化钙、氟化亚锡、聚乙二醇 6000、聚丙烯酸粉末、鞣酸白蛋白、永久黄 GG；
- 液剂：聚丙烯酸水溶液、蒸馏水。

【适用范围】

齿科修复，用于嵌体、冠、桥体及正畸带环的粘接。

【特点】

本品是一种粘接用聚羧酸盐水门汀，操作性强，薄膜厚度薄，与牙体结构粘接牢固，具有良好的生物相容性和持久性。

【性能指标等】

项目	推荐参数
粉/液比例	2.0 g/1.0 g
调和时间	30 秒
工作时间	2 分 15 秒
净固化时间	6 分 15 秒（参考值）
X 射线阻射性	本品具有 X 射线阻射性

适用标准：YY 0271.1

*YY 0271.1 中，净固化时间的规格值为 2.5~8 分钟。

【使用方法等】

1. 粉末·液的计量
 - a) 标准粉液比为 2.0 g/1.0 g（1 平匙粉对应 3 滴液）。
 - b) 要取得精确的粉，轻敲瓶子，不要振动或倒转。
 - c) 轻轻地垂直挤压液体瓶。如果液体在瓶子头部阻塞，用湿纱布除去。
 - d) 使用后应立即盖好瓶子。

2. 调和

将粉和液置于调和板（调拌纸或者玻璃调和板）上。使用塑料调刀，将粉平均分成相等的两部分。

将一部分与液体调拌 15 s，再加入另一部分，再调

和 15 s（一共 30 s）。

注意：对于多量的桥体，可以调拌足够量的材料，调拌 30~60 s。

3. 粘接

使用标准器械粘接调和好的水门汀。可以在其还柔软的时候将多余的水门汀用湿纱布清除。

【注意事项】

- 1、本品设计在 21~25 °C 温度下使用。
- 2、补缀修复物剩余的水门汀，可趁其尚未固化时用湿纱布等迅速擦除。
- 3、不可与其他产品混用。
- 4、粉末与液体的容器在使用后立即盖紧瓶盖，特别注意粉末不可受潮。
- 5、本品不可用于【适用范围】记载的用途以外。
- 6、非牙科医疗资格取得人员请勿擅用本品。

【禁忌症】

- 1、本品不可用于盖髓。
- 2、本品不可使用于对聚羧酸盐水门汀有发疹、皮肤炎等过敏症状既往史的患者。
- 3、对于因使用本品而引起发疹等过敏症状的患者请停止使用，立即就医。
- 4、对本品有发疹、皮肤炎等过敏症状既往史的医生不可使用本品，且由于使用本品而导致过敏症状时请停止使用，立即就医。
- 5、注意避免使液体、调拌物、窝洞调理剂及牙本质调理剂沾在口腔软组织或皮肤上，或入眼。如沾上请立即用酒精棉等擦去后以流水洗净。万一入眼，即刻以大量流水洗净，接受眼科医师治疗。

【保管方法及使用期限等】

[保管方法]

- 放置于阴凉干燥处，温度 4~25 °C，避免置于阳光直射下。
- 请妥善保管·管理本品，避免非牙科人员接触。
- 批号：见外包装。

[使用期限]

有效期：3 年

生产日期：见外包装

【包装】

粉剂 50 g/瓶，液剂 30 g(25.4 mL)/瓶
附属品：调拌纸（No.22），量勺

【注册人/生产企业】

名称：而至齿科（苏州）有限公司
住所：苏州工业园区青丘街 127 号
生产地址：①苏州工业园区青丘街 127 号
②苏州工业园区方洲路 128 号南楼 103 室

【售后服务单位】

名称：而至齿科（苏州）有限公司
住所：苏州工业园区青丘街 127 号
电话：0512-62833083
传真：0512-62833089
邮编：215126

【生产许可证编号】苏药监械生产许 20030100 号

【医疗器械注册证编号】国械注准 20153170976

【产品技术要求编号】国械注准 20153170976

说明书修订日期：2024 年 05 月 版本号：08