

亲水暂封材

【禁忌·禁止】

勿用于对本品的成分有发疹、皮炎等过敏病史的患者。

【产品名称】

亲水暂封材

CAVITON HYDRAULIC TEMPORARY RESTORATIVE

【型号、规格】

30g/罐

【主要结构组成或者成分】

该产品主要由氧化锌、硫酸钙、聚醋酸乙烯酯组成。

【适用范围】

该产品用于窝洞治疗中的临时性封闭、充填。

【性能指标等】

项 目	性能指标
扩展范围	13-17mm

(试验方法：公司内部方法)

【操作方法】

- 1) 用棉球将窝洞中多余的水分擦拭干净。
- 2) 在窝洞里适量填充本材料，用湿的填充器等对填充物进行表面成型后，让患者立刻闭口，使填充物充分接触唾液。
- 3) 告诫患者填充后一小时之内，不要使劲咬合。
- 4) 需要除掉固化后的填充物时，使用牙刮匙等手持器械进行清除。根据需要，也可以使用旋转切削器具进行低速旋转清除。

【有关使用方法中的注意事项】

- 1) 窝洞较深时，盖髓、垫底后再填充本品。[否则有可能对牙髓造成不良影响]
- 2) 窝洞潮湿的话，不能充分接触到填充物，所以，要使其干燥到像用棉球擦过一样。
- 3) 窝洞填充后，清除多余材料时，为了不让患者吞下，一边使用吸唾器吸取，一边小心地进行清除。
- 4) 本品与水分接触后，会加速固化，所以，请不要使用潮湿的器具取用本品。
- 5) 在使用丁香酚类的材料后，使用本品时，请用棉球进行垫底，或是涂抹矿脂之后，再进行本品的填充。直接填充的话，不能很好地固化，所以，请勿直接填充。
- 6) 填充本品时，注意不要用力施压。[否则有可能对牙髓造成不良影响]
- 7) 告诫患者填充后一小时之内，不要使劲咬合。[有可能发生暂封破损而达不到封闭效果]
- 8) 填充后使用时间过长的话，会不容易取出，本品的适宜时间为两周，超出这个时间时，请更换合适的新材料重新进行暂时封闭。
- 9) 清除填充物时，在窝洞上残留有本品时，请用酒精棉球擦拭清除。[否则有可能阻碍修复体和牙体的粘接]

【使用中的注意事项】

- 1) 使用注意
 - ① 请勿与其他产品混用。
 - ② 本品具有与空气中的水分接触后，会缓慢固化的性质，所

以装有膏体的容器在使用后需要立刻密封。

③ 请勿将本品用于【适用范围】记载以外的用途。

④ 没有口腔执业医师资格证书者请勿使用本品。

2) 基本注意事项

① 勿用于对本品的成分有发疹、皮炎等过敏病史的患者。

② 使用本品而有发疹等过敏的患者，请立即停止使用，并立刻请医生诊断。

③ 对本品有发疹、皮炎等过敏史的医生，切勿使用本品。此外使用中发生过敏时，停止使用并立即接受医生诊断。

④ 一定注意不要使本品进入眼睛里，不慎进入眼睛时，立刻用大量的流水冲洗干净，并接受眼科医生的诊治。附着在皮肤上的话，也要用大量的流水冲洗干净。[有可能对眼睛造成损伤]

【贮藏·保管方法及使用期间等】

[贮藏·保管方法]

·请将本品放置在干燥的地方。

·避免日光直射、室温下保管。

·加强管理以防牙科从业人员之外的人员接触本品。

[使用期限]

本品应在包装记载的使用日期*前使用。

※ (如 EXP 2021-02

表示使用期限为 2021 年 2 月。)

产品有效期：2 年

生产日期：见外包装

【包装】

·一盒 = 30g (颜色：粉色、白色)

【注册人及代理人的住所及联络方式等】

注册人名称：而至陶齿工业株式会社

注册人住所：爱知县春日井市鸟居松町2-285

生产地址：爱知县春日井市鸟居松町2-285

注册人联系方式(客服电话)：0120-416480

代理人名称：而至齿科(苏州)有限公司

代理人住所：江苏省苏州工业园区青丘街127号

售后服务：而至齿科(苏州)有限公司

经营地址：江苏省苏州工业园区青丘街127号

联系方式：电话 0512-62833083

传真 0512-62833089 邮编 215126

产品技术要求编号：国械注进20163173197

医疗器械注册证编号：国械注进 20163173197

说明书修订日期：2021 年 7 月

版本号：04