

牙科输送器

CD Dispenser III


【型号/规格】

CD Dispenser III

【主要结构组成或者成分】

材质：聚缩醛 铝 不锈钢

形状

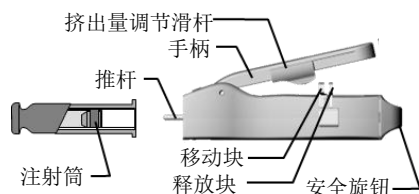

【预期用途】

用于将充填材料输送、填入至目标位置。


【性能指标等】

[物理性质]

全长	推杆收起时	128 mm
	推杆挤出时（最大）	183 mm
全宽		41 mm
全高	放下手柄时的收纳状态	38 mm
	提起手柄时的高度	56.5 mm
重量		133 g

【使用方法等】


- 1) 在推杆完全在 CD Dispenser III 内进行的情况下进行注射筒的安装及取下。推杆推出输送器本体时，打开手柄，用力按压住移动块与释放块滑动至后端部位，使推杆缩回输送器本体内。

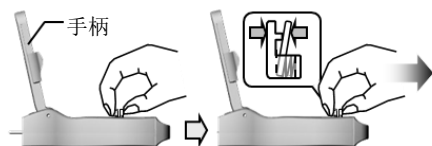

- 2) 注射筒安装至 CD Dispenser III 时、
 - ① 将 CD Dispenser III 嵌合部的 ▲ 标记对准注射筒的 ▲ 标记。
 - ② 以 ▲ 标记为中心使之旋转进行安装。（通过点击感确认已旋转至最后），取下注射筒时与之相反。
- 3) 注射筒装有盖子的情况下，按压释放块的根部使推杆前端与注射筒中心部位相

对。尽可能按压释放块下部，使其能够顺畅滑动。

- 4) 将 CD Dispenser III 上[安全旋钮]箭头旋转 90 度弹出手柄，进行糊剂的采取。（除此之外的位置，无法通过按压手柄进行操作）

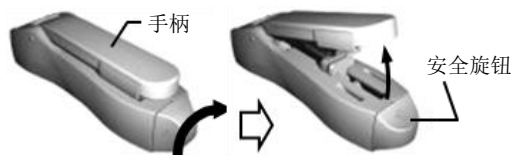

旋转[安全旋钮]时，勿按压手柄。

- 5) 取下注射筒盖子。注意确认注射筒安装状态是否有偏离。
- 6) 按压 CD Dispenser III 手柄挤出糊剂，在调拌纸上进行使用。移动挤出量调节滑杆，通过改变位置，调节挤出的糊剂量。挤断糊剂时勿松开手柄。

[使用方法相关注意]

- 1) 如果注射筒安装不恰当，可能造成左右两管的糊剂挤出量的不标准。
- 2) 安装注射筒后，初次使用时，先挤出一定糊剂，均衡左右糊剂挤出量。（第 2 次之后就可按照标准比挤出糊剂）
- 3) 采取糊剂时，切勿松开手柄。（若松开手柄进行糊剂采取时，糊剂可能会被吸入注射筒中，造成左右糊剂量不均匀）
- 4) 取下注射筒时，将移动块拉回后部（推杆复位）后，向左旋转取下注射筒。
- 5) 安装注射筒的方向要保持一致。（安装方向若发生变化，可能会导致无法采取适合量的左右糊剂。可通过对准 ▲ 标记规定方向。）
- 6) 勿对 CD Dispenser III 进行上油。（上油会使推杆打滑，无法采取注射筒中的糊剂）
- 7) 若安装注射筒后，不慎掉落 CD Dispenser III，可能会损伤注射筒。
- 8) 滑动移动块时需注意向前滑动，向后滑动手指按压方法不同。
- 9) 手柄打开状态不慎落下 CD Dispenser

III, 可能会损坏内部部品, 使用完毕后
旋转安全旋钮将手柄收起放置。

【使用上的注意】

- 1) 使用注意
 - ① 勿使用高压灭菌器对 CD Dispenser III 进行消毒。
 - ② 禁止使用药水浸泡进行清洗、消毒, 否则会使产品操作性降低, 生锈。(推荐使用纱布蘸取酒精进行表面清洗消毒)
 - ③ 在使用本产品进行操作时, 注意勿将手夹在手柄与输送器本体之间。
 - ④ 将材料注射筒安装到本品, 从注射筒内采取合适比例的糊剂量, 勿将本品使用该用途以外的用途。
 - ⑤ 无牙科行医资格者勿使用本品。
- 2) 重要的基本注意
 - ① 如因使用本品而发生发疹, 皮肤炎症过敏症状时, 应停止使用, 立刻接受医生的诊断。


【保管方法及使用期限等】

[贮藏·保管方法]

- 1) 请妥善保管本品, 禁止牙科职业人员之外的人员接触本品。
- 2) 本品与碘酒为代表的卤族元素接触时会发生变色·变质, 勿与本品放置在同一场所。

[使用期限]

本品应在包装记载的使用期限之前使用。

※ (例  2025-09-15 表示使用期限为 2025 年 9 月 15 日)



生产日期: 见外包装

有效期: 10 年

【包装】

1 盒=1 个

【标签上图形、符号的解释】

 : 生产批号  : 使用期限

【备案人/生产企业及代理人的住所及联络方式等】

备案人/生产企业名称: 株式会社盐田

备案人住所: 栃木县那须乌山市东原 53 番地

生产企业住所: 栃木县那须乌山市东原 53 番地

生产地址: 栃木县那须乌山市东原 53 番地

备案人联系方式: 0287-88-2288

代理人/售后服务单位名称: 而至齿科(苏州)有限公司

代理人/售后服务单位住所: 苏州工业园区青丘街 127 号

电话: 0512-62833083

传真: 0512-62833089

邮编: 215126

原产地: 日本

医疗器械备案凭证编号: 国械备 20160218

产品技术要求编号: 国械备 20160218

说明书修订日期: 2023 年 12 月 版本号: 03