

Magnafill Putty

·光固化复合树脂·



多色号可选

A1、A2、A3、
A3.5、A03

而至齿科（苏州）
有限公司的第一款
自主研发产品

【型号、规格】

型号：Magnafill Putty
规格：4g/支
色号：A1、A2、A3、A3.5、A03

【产品基本信息】

无机填料的粒度分布为0.01μm~1.0μm，体积百分比约占(50~56)%。

【原理】

本品为膏体状，经过可视光的照射，单体聚合而固化。

【医疗器械注册证编号】：国械注准20233171613

【性能指标等】

项目	性能
X射线阻射性	大于或等于材料同等厚度的铝板

根据YY 1042，分类为：1型、II类1组
1型：适用于涉及牙合面修复的聚合物基修复材料
II类1组：口腔内光固化型材料

【包装】

单支装：4g/支

【适用范围】

- 1.前牙III、IV、V类窝洞、后牙I、II、V类窝洞的直接修复；
- 2.楔状缺损和根面龋环的直接修复；
- 3.贴面间隙的关闭。

【使用方法等】

比色→窝洞预备→粘接处理→充填→光固化前修整→光固化→精修和抛光

【使用方法中的注意事项】

光照射时间（秒）与有效固化深度（mm）

色号	照射时间	20秒 (卤素灯 / LED 灯>700 mW/cm ²)
	A1、A2、A3、A3.5	
A03		1.0mm



禁忌内容或者注意事项详见说明书 | 苏械广审(文)第280409-22613号

公司名称：而至齿科（苏州）有限公司 住所：苏州工业园区青丘街127号
电话：0512-62833083 传真：0512-62833089 邮编：215126